



## RESUMO/CHECK-LIST PARA ENVIO

### 1. Amostra

Lâminas da punção (PAAF) dentro do(s) PORTA-LÂMINAS fornecidos

Etiqueta(s) do(s) PORTA-LÂMINAS preenchidas

### 2. Documentação:

***Dentro do kit de transporte (envelope interno)***

Formulário Pedido Médico preenchido, assinado e carimbado (médico)

Termo (TCLE) preenchido e assinado (paciente ou responsável legal)

Cópia do Laudo/Resultado do exame citológico da punção (PAAF)

***Fora do kit de transporte (envelope plástico transparente na parte inferior)***

Declaração do Conteúdo assinada (remetente) e dentro do envelope plástico transparente (localizado embaixo do kit de transporte)

### 3. Lacre e Envio:

Tampa do kit de transporte lacrado com o lacre fornecido



## INSTRUÇÕES DETALHADAS

### 1. Amostra

✓ **Solicite a amostra (lâminas da punção - PAAF) do seu nódulo indeterminado**

Entre em contato com o laboratório que emitiu o Laudo/Resultado da sua punção (PAAF) e solicite a retirada deste material. *(É possível que o laboratório onde você realizou a PAAF seja diferente do laboratório que analisou a amostra e emitiu o resultado)*

- A. O material que foi coletado na sua PAAF foi preparado em forma de **lâminas de citologia** que ficam obrigatoriamente **armazenadas no laboratório onde foram analisadas** por, no mínimo 5 anos;
- B. Estas lâminas são, por determinação do CFM **de propriedade do paciente** e este (ou pessoa autorizada por escrito) podem solicitar essas lâminas ao laboratório até 5 anos após a PAAF;
- C. O laboratório deve, por determinação do CFM, **entregar este material ao paciente** (ou a pessoa autorizada por escrito). Cada laboratório tem um processo diferente para esta solicitação;
- D. A maioria dos laboratórios dispõe de um formulário interno, que deve ser preenchido e assinado pelo paciente (ou pessoa autorizada por escrito);
- E. O processo de liberação e entrega das lâminas geralmente demora de 12h a 5 dias úteis;
- F. Alguns laboratórios exigem que a solicitação seja feita formalmente por um médico (embora não seja obrigatório, por determinação do CFM).

## 1. Amostra (continuação)

### ✓ Coloque as lâminas nos tubos Porta-Lâminas do seu kit de transporte

- O seu kit de transporte contém 3 tubos Porta-Lâminas;
- Utilize quantos forem necessários;
- Abra a tampa do Porta-Lâminas, encaixe as lâminas dentro do tubo e feche novamente
- Preencha a etiqueta do tubo com seu nome e CPF;
- Encaixe o tubo Porta-Lâminas de volta no seu kit de transporte.

#### ATENÇÃO



- Não é necessário armazenar as lâminas em temperatura especial, elas são estáveis em temperatura ambiente;
- Não há problema em pegar as lâminas com a mão, mesmo sem luvas. Só tome cuidado, pois são de vidro perfurocortantes;
- Caso tenha blocos de parafina, coloque dentro de um tubo se possível.

## 2. Documentação:

### ✓ Interna (dentro do kit de transporte - envelope interno)

Dentro do seu kit de transporte existe um envelope para a documentação obrigatória que deve ser enviada para realização do exame:

- Pedido médico [FORM-01]: Deve ser preenchido, assinado e carimbado pelo seu médico;
- TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido [FORM-02]: Deve ser preenchido e assinado pelo paciente e/ou representante legal;
- É **obrigatório** que você também envie uma cópia **Laudo/Resultado do exame citológico da PAAF** do nódulo que será analisado;
- Insira os documentos no envelope fornecido e coloque o envelope de volta dentro do seu kit de transporte.

## 2. Documentação (continuação):

### ✓ Externa (Fora do kit de transporte - envelope plástico transparente na parte inferior)

A legislação brasileira exige que toda embalagem transportada contenha uma “Declaração de Conteúdo” anexada externamente à embalagem.

- Na parte inferior do seu kit de transporte, dentro de um envelope plástico transparente, você encontrará a “Declaração de Conteúdo”;
- Retire a “Declaração de Conteúdo” do envelope (abertura por trás);
- Preencha no local indicado a data e assine;
- Insira a “Declaração de Conteúdo” **de volta ao envelope plástico**, de forma que os campos “Remetente” e “Destinatário” estejam visíveis.

## 3. Lacre e Envio (não é necessário embrulhar):

Dentro do seu kit de transporte você encontra um lacre inviolável (redondo)

- Feche o seu kit de transporte e vede a tampa do kit com este lacre;
- Na lateral do seu kit de transporte, preencha as informações de remetente;
- Vá a uma agência de Correios e envie o **para o endereço já impresso** na tampa do seu kit de transporte; Não é necessários embrulhar;
- Para o envio do seu kit, utilize a nossa logística reversa que consta na declaração de conteúdo destacado em amarelo.

**CASO TENHA QUALQUER DÚVIDA E PRECISE DE AUXÍLIO,  
ENTRE EM CONTATO CONOSCO:**

onkos@onkos.com.br ou ☎ (16) 99700-4265 / (16) 4141-5120