

Resumo/Check-list para envio:

1. Amostra:

- Lâminas da punção (PAAF) dentro do(s) PORTA-LÂMINAS fornecidos.
- Etiqueta(s) do(s) PORTA-LÂMINAS preenchidas.

2. Documentação:

a. Dentro do kit de transporte (envelope interno)

- Formulário Pedido Médico preenchido, assinado e carimbado (médico).
- Termo (TCLE) preenchido e assinado (paciente ou responsável legal).
- Cópia do Laudo/Resultado do exame citológico da punção (PAAF).

b. Fora do kit de transporte (envelope plástico transparente na parte inferior)

- Declaração de Conteúdo assinada (remetente) e dentro do envelope plástico transparente (localizado embaixo do kit de transporte).

3. Lacre e envio:

- Tampa do kit lacrado com o lacre fornecido.

Instruções detalhadas

1. Amostra:

Solicite a amostra (lâminas da punção - PAAF) do seu nódulo indeterminado.

Entre em contato com o laboratório que emitiu o Laudo/Resultado da sua punção (PAAF) e solicite a retirada deste material. *(É possível que o laboratório onde você realizou a PAAF seja diferente do laboratório que analisou a amostra e emitiu o resultado)*

A. O material que foi coletado na sua PAAF foi preparado em forma de **lâminas de citologia** que ficam obrigatoriamente **armazenadas no laboratório onde foram analisadas** por, no mínimo, 5 anos;

B. Estas lâminas são, por determinação do CFM, **de propriedade do paciente** e este (ou pessoa autorizada por escrito) podem solicitar essas lâminas ao laboratório até 5 anos após a PAAF;

C. O laboratório deve, por determinação do CFM, **entregar este material ao paciente** (ou a pessoa autorizada por escrito). Cada laboratório tem um processo diferente para esta solicitação;

D. A maioria dos laboratórios dispõe de um formulário interno, que deve ser preenchido e assinado pelo paciente (ou pessoa autorizada por escrito);

E. O processo de liberação e entrega das lâminas geralmente demora de 12h a 5 dias úteis;

F. Alguns laboratórios exigem que a solicitação seja feita formalmente por um médico (embora não seja obrigatório, por determinação do CFM).

1. Amostra (continuação):

Coloque as lâminas nos tubos Porta-Lâminas do seu kit de transporte

- A. O seu kit de transporte contém 3 tubos Porta-Lâminas;
- B. Utilize quantos forem necessários;
- C. Abra a tampa do Porta-Lâminas, encaixe as lâminas dentro do tubo e feche novamente;
- D. Preencha a etiqueta do tubo com seu nome e CPF;
- E. Encaixe o tubo Porta-Lâminas de volta no seu kit de transporte.

ATENÇÃO

- Não é necessário armazenar as lâminas em temperatura especial, elas são estáveis em temperatura ambiente;
- Não há problema em pegar as lâminas com a mão, mesmo sem luvas. Só tome cuidado, pois são de vidro perfurocortantes;
- Caso tenha blocos de parafina, coloque dentro de um tubo, se possível.



2a. Documentação interna

(Dentro do kit de transporte - envelope interno)

Dentro do seu kit de transporte existe um envelope para a documentação obrigatória que deve ser enviada para realização do exame:

- A. Pedido médico: Deve ser preenchido, assinado e carimbado pelo seu médico;
- B. TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Deve ser preenchido e assinado pelo paciente e/ou representante legal;
- C. É **obrigatório** que você também envie uma cópia **Laudo/Resultado do exame citológico da PAAF** do nódulo que será analisado;
- D. Insira os documentos no envelope fornecido e coloque o envelope de volta dentro do seu kit de transporte.

2b. Documentação externa

(Fora do kit de transporte - envelope plástico transparente na parte inferior)

A legislação brasileira exige que toda embalagem transportada contenha uma "Declaração de Conteúdo" anexada externamente à embalagem.

- A. Na parte inferior do seu kit de transporte, dentro de um envelope plástico transparente, você encontrará a "Declaração de Conteúdo";
- B. Retire a "Declaração de Conteúdo" do envelope (abertura por trás);
- C. Preencha no local indicado a data e assine;
- D. Insira a "Declaração de Conteúdo" **de volta ao envelope plástico**, de forma que os campos "Remetente" e "Destinatário" estejam visíveis.

3. Lacre e Envio (não é necessário embrulhar):

Na aba na frente do kit você encontra um lacre inviolável

- A. Feche o seu kit de transporte e vede a tampa do kit com este lacre;
- B. Vá a uma agência de Correios e envie o **kit para o endereço já impresso** na tampa do seu kit de transporte; Não é necessário embrulhar;
- C. Para o envio do seu kit, utilize a nossa logística reversa que consta na declaração de conteúdo destacado em amarelo.

Dúvidas? Entre em
contato conosco no QR
Code ou telefone ao lado: ☎ (16) 99700-4265

Atendimento
ao paciente

